

GEBRUIKSAANWIJZING

Comfort-Seat

Blooming bidet model AB



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding.....	3
1.1 Symbolen	3
2. Onderdelen	4
3. Hoe gebruik ik de Comfort-Seat?	5
4. Welke extra functies heeft de AB?	6
5. Wat moet ik nog meer weten?	7
6. Onderhoud en veiligheid.....	8
6.1 Onderhoud.....	8
6.2 Veiligheidsvoorschriften	8
7. Problemen en service	9
7.1. Problemen oplossen.....	9
7.2. Service en support.....	9

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van jouw Comfort-Seat. In dit document lees je hoe je het product correct gebruikt. Lees deze handleiding volledig door als je de Comfort-Seat voor het eerst gebruikt.

 **Opmerking:** Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Symbolen


In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

Symbool	Betekenis
 Waarschuwing	Gevaar of risico voor de gebruiker
 Opmerking	Aanvullende informatie
 Tip	Aanbevolen werkwijze


2. Onderdelen

De AB heeft een klein bedieningspaneel naast de zitting, waar je de belangrijkste functies mee kunt bedienen. Via de afstandsbediening zijn alle functies en de meeste instellingen te bedienen.


ZITTING

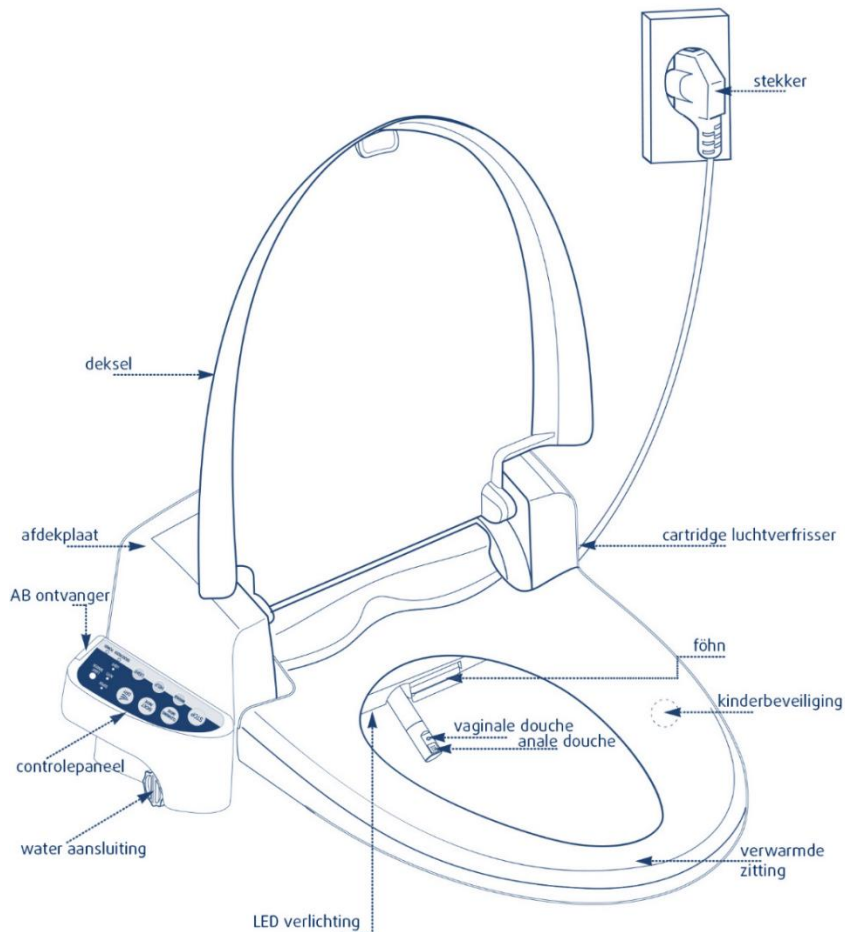


AFSTANDBEDIENING

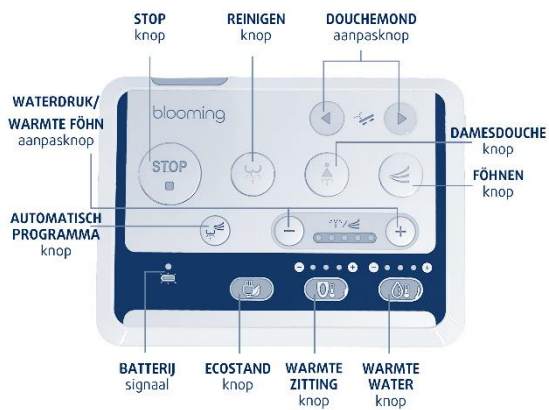

BEDIENINGSPANEEL NAAST ZITTING

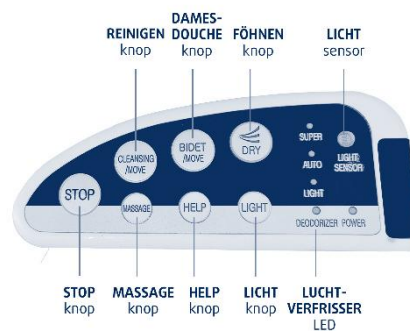


3. Hoe gebruik ik de Comfort-Seat?

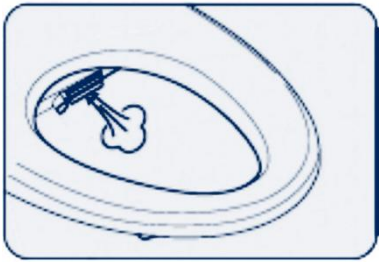


1. Ga zitten

- Ga goed in het midden van de zitting zitten.

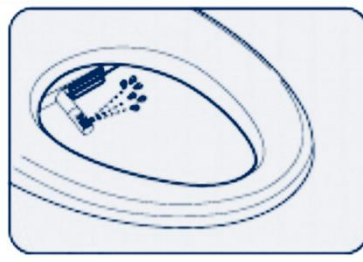


2. Druk op de knop REINIGEN of DAMESDOUCHE

- Kies REINIGEN voor de anale douche of DAMESDOUCHE voor de vaginale douche.
- Je wordt 1 minuut gedoucht.
- Je kunt wisselen tussen beide functies tijdens het douchen.

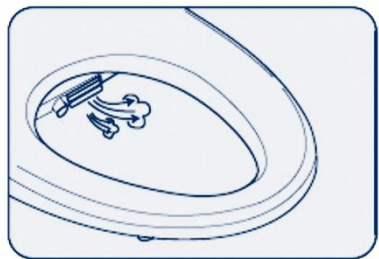

3. Druk op de knop FÖHNEN

- Je wordt gedroogd voor 3 minuten.
- (Bij het automatische programma is dit 1 minuut.)

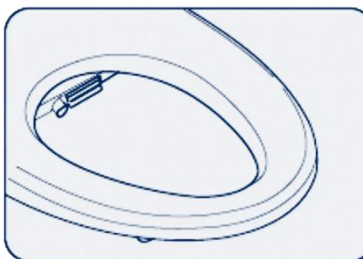

4. Druk op de knop STOP

- Als je het douchen of föhnen eerder wilt stoppen.

 **Opmerking:** De kinderbeveiliging voorkomt dat de knoppen geactiveerd worden als je niet op de Comfort-Seat zit. Zorg daarom dat je altijd goed in het midden van de zitting gaat zitten. De beveiliging reageert op huidcontact. Gebruik daarom geen hoes of andere bedekking op de zitting.

 **Opmerking:** Activeer je meerdere keren achter elkaar de douchefunctie, dan zal de watertemperatuur langzaam zakken. Om warm water te krijgen wacht je 3 minuten voor je de douche weer inschakelt.

 **Opmerking:** Wij raden aan dat ook heren alleen zittend gebruik maken van het toilet. Je voorkomt hiermee dat urine in het apparaat terecht kan komen en de elektronica beschadigd.

4. Welke extra functies heeft de AB?

Zwenkende douche

Je kunt de waterstraal heen en weer laten bewegen tijdens het douchen. Hiervoor druk je 2x op de knop REINIGEN of DAMESDOUCHE.


Je stopt het door nogmaals op de knop REINIGEN of DAMESDOUCHE te drukken.

Waterdruk

Om de hoeveelheid water aan te passen druk je op de knoppen WATERDRUK + en – tijdens het douchen.

Watertemperatuur

Om de temperatuur van het water aan te passen druk je op de knop WARMTE WATER tot je de gewenste stand hebt.

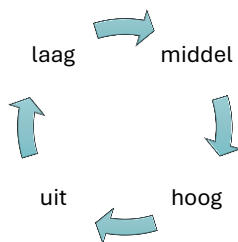

Douchemonid


Komt de waterstraal niet op de juiste plek dan kun je dit aanpassen door de pijlknoppen DOUCHEMONID in te drukken tijdens het douchen. Je kunt hiermee de straal meer naar voren of naar achteren bewegen.

Temperatuur föhn

Wil je de temperatuur aanpassen van de föhn, druk dan op de WATERDRUK/WARMTE FÖHN + en – knoppen. Dit werkt alleen terwijl de föhn aanstaat.

Temperatuur zitting

Om de temperatuur van de zitting aan te passen druk je op de knop WARMTE ZITTING tot je de gewenste stand hebt.

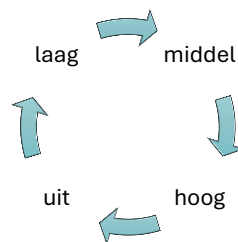

Opmerking: De Comfort-Seat onthoudt de laatst gebruikte instellingen van waterdruk en de temperaturen voor water, zitting en föhn. Ook als het apparaat wordt uitgeschakeld. Het is niet nodig om na een stroomstoring dit opnieuw in te stellen.

Automatisch programma

Met het automatische programma wordt de anale douche gecombineerd met de föhn. Beide werken 1 minuut.

Druk op de knop AUTOMATISCH PROGRAMMA om het te starten.

De watertemperatuur en -zitting is hierbij standaard medium. Je kunt de temperatuur aanpassen tijdens het programma.

Uitschakelen

Om de Comfort-Seat AB uit te schakelen, druk je op de knop STOP voor 4 seconden.

Druk op een willekeurig knop om weer in te schakelen. (Behalve de knoppen + en – van de waterdruk/warmte föhn).

Help

Wanneer je op de knop HELP op het bedieningspaneel van de zitting indrukt klinkt er voor 30 seconden een geluidsignaal, zodat eventuele huisgenoten je hulp kunnen bieden.

Het geluidsignaal kan worden gestopt door te drukken op STOP of nogmaals op HELP te drukken.

Massage

Om de douchestraal te laten pulseren druk je op de knop MASSAGE (bedieningspaneel zitting).

Dit werkt alleen tijdens het douchen.

5. Wat moet ik nog meer weten?

Oververhitting

Zit je langer dan 30 minuten op de bril en heb je de hoogste temperatuur voor de zitting ingeschakeld, dan zal de zitting minder warm worden. Dit is een veiligheidsinstelling om je huid te beschermen tegen oververhitting.

Batterijen afstandsbediening

In de afstandsbediening zitten 2 AA-batterijen.

Als het lampje BATTERIJ aan en uit knippert op de afstandsbediening, dan zijn de batterijen aan vervanging toe.

De batterijen gaan ongeveer een jaar mee.

 **Waarschuwing:** Gebruik alleen geschikte batterijen en plaats ze zoals aangegeven op de afstandsbediening. Combineer geen oude en nieuwe batterij.

Douchemond reinigen

De douchemond wordt voor en na ieder gebruik automatisch gereinigd.

Voor handmatig reinigen druk je gelijktijdig op de knoppen REINIGEN en DAMESDOUCHE. De douchemond komt naar buiten. Gebruik een kleine (tanden)borstel om de douchemond te reinigen.

Druk je op STOP dan gaat de douchemond terug naar zijn basispositie.

Energiebesparing

Om energie te besparen kun je kiezen uit twee energiezuinige standen.

Hiervoor druk je op de knop ECOSTAND. Indicatielampjes op het bedieningspaneel naast de zitting geven aan welke stand geselecteerd is.

In de stand AUTO wordt het water en de zitting op 30°C gehouden en te toiletzitting op temperatuur gehouden.

In de stand SUPER wordt het water en zitting alleen verwarmd tijdens gebruik.

Ledverlichting

In schemerige en donkere ruimtes gaat automatisch een Led-lampje in de bril branden.

Door op de knop LICHT te drukken kun je deze functie in- en uitschakelen.

De Led-lamp verbruikt zeer weinig energie. Het zal geen verschil maken voor je energierekening als je deze functie gebruikt.

6. Onderhoud en veiligheid

6.1 Onderhoud

Je reinigt de Comfort-Seat met zachte schoonmaakmiddelen en een vochtige doek. Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken

Let erop dat je urinevlekken direct schoonmaakt om verkleuringen en aantasting van de zitting te voorkomen.

Voor het reinigen van de douchemond druk je gelijktijdig op de knoppen REINIGEN en DAMESDOUCHE. De douchemond komt naar buiten. Gebruik een kleine (tanden)borstel om de douchemond te reinigen. Druk op STOP als je klaar bent om de douchemond weer terug te laten gaan.

 **Waarschuwing:** Gebruik geen agressieve middelen, schuursponsjes of chloor. Deze middelen kunnen de toplaag van de bril beschadigen. Voorkom dat er water of urine op of in het apparaat terecht komt.

 **Tip:** Door jaarlijks preventieve inspectie en onderhoud gaat de Comfort-Seat meestal een paar jaar langer mee. Hiervoor kun je een servicecontract bij ons afsluiten.

6.2 Veiligheidsvoorschriften

Neem altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

 **Opmerking:** Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

- Gebruik het product uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen
- Zorg dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door bevoegd personeel.

7. Problemen en service

7.1. Problemen oplossen

Raadpleeg onderstaande tabel bij veelvoorkomende problemen. Lost dit het probleem niet op of staat je probleem hier niet beschreven, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

Probleem	Mogelijke oplossing
Comfort-Seat gaat niet aan	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Druk op een willekeurige knop, niet de + en – knoppen. Controleer of de stroom werkt.
Douchen of föhnen start niet	De kinderbeveiliging voorkomt dat het douchen of föhnen werkt als je niet goed op de zitting zit. Ook bij gebruik van een hoes om de bril zal de kinderbeveiliging voorkomen dat de Comfort-Seat start.
Comfort-Seat reageert niet op de afstandsbediening	Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
De douchemondd spuit niet op de goede plek	Gebruik de pijlknoppen DOUCHEMOND om de stand van de douchemondd te wijzigen terwijl de douche gebruikt wordt.
De föhn is niet warm genoeg.	Druk op de WATERDRUK/WARMTE FÖHN + en – knoppen om de temperatuur van de föhn aan te passen tijdens het drogen.
Het douchewater is koud.	Druk op de WARMTE WATER knop om de gewenste temperatuur te selecteren. Heb je meerdere keren de REINIGEN of DAMESDOUCHE functie achter elkaar gebruikt dan is de boiler leeg. Wacht 3 minuten voor je de functie weer activeert.
Er brandt constant een lampje in de bril.	Dit lampje brandt automatisch in donkere ruimtes. Wil je dit niet, druk dan op de knop LICHT om deze functie uit te schakelen.

7.2. Service en support

Heb je een vraag of is er sprake van een storing?

Onze serviceafdeling kun je bereiken via

+31 (0)79 363 3040

service@pronkergo.nl

Pronk ergo Woon+
Nederland
T. +31 (0)79 361 13 40
E info@pronkergo.nl

www.pronkergo.nl

Pronk ergo Woon+
België
T +32 (0)50 32 20 20
E. info@pronkergo.be

www.pronkergo.be

Bezoek één van
onze showrooms:



www.pronkergo.nl/showrooms

+ Deskundig & dichtbij + Zorgeloos geregeld + Passend bij elke situatie